


Bedienungshinweis gako unguator Kruke

Zur Entnahme der Salbe wird die kleine weiße Krukenkappe vom Deckel der Kruke abgeschraubt.

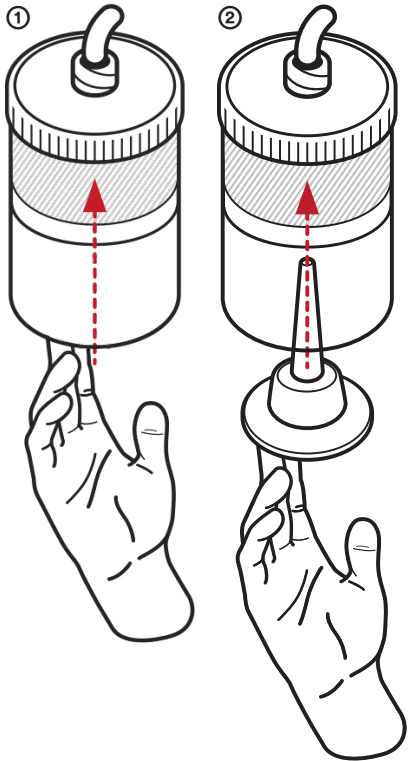


① Mittels Druck von unten gegen den Krukenboden kann die Salbe aus der Kruke entnommen werden.

② Bei der 200 ml Kruke wird der beiliegende lange Applikator als Schiebehilfe genutzt. Hierzu stecken Sie das Spitze Ende des Applikators in die hierfür vorgesehene Aussparung in der Kappe am Boden der Kruke. Die Salbe kann nun mittels Druck gegen das flache Ende des Applikators und somit gegen den Boden aus der Kruke entnommen werden.

Achten Sie beim ersten Gebrauch darauf, den Boden langsam nach oben zu schieben, um evtl. Luft einschließen zu lassen und um festzustellen welcher Druck für die Konsistenz Ihrer Salbe der richtige ist.

Bedienungshinweis gako unguator Kruke mit Spindel

Zur Entnahme der Salbe wird die kleine weiße Krukenkappe vom Deckel der Kruke abgeschraubt.

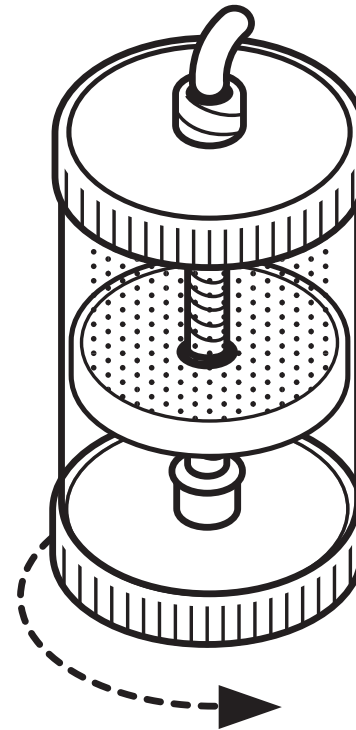

Durch das Drehen der Spindel am Boden der Kruke gegen den Uhrzeigersinn kann die Salbe aus der Kruke entnommen werden. Hierbei wird durch einen luftleeren Raum im Inneren der Kruke ein Druck erzeugt, der den Krukenboden nach oben schieben lässt.

Achten Sie beim ersten Gebrauch darauf, die Spindel langsam zu drehen, um evtl. Luft einschließen zu lassen und um festzustellen, welcher Druck für die Konsistenz Ihrer Salbe der richtige ist.